

med3D Ernährungstagebuch Android-App: Beschriftung mit eigenem QR-Code

Stand: 6.9.2017, Wolfram.Stein@med3D.de

Beispiel Käse aus Originalverpackung in Kühlschrankdose aufbewahren:

1. Eigenen beliebigen QR-Code auf Kühlschrankdose anbringen.
2. Barcode des Käse auf der Originalverpackung wie gehabt einscannen, Daten erfassen oder aus Datenbank abrufen.
3. In der App durch langes Drücken auf 'Barcode-Scan' den Lern-Modus aktivieren, der bekannte QR-/Barcode-Scanner wird gestartet.
4. Eigenen QR-Code einscannen.

Damit ist jetzt der neue QR-Code ein Verweis auf den Barcode des zuvor ausgewählten Produktes. Wenn in der gleichen Aufbewahrungsdose ein anderes Produkt aufbewahrt werden soll, so kann der eigene QR-Aufkleber weiterhin genutzt werden, es muss nur einfach das neue Produkt im Lern-Modus zugeordnet werden.

Dies kann auch hilfreich sein zB bei selbstgemachter Marmelade usw. oder wenn der originale Produkt-Barcode auf der Unterseite angebracht und bei geöffneter Verpackung nur schwer zu scannen ist.

Beispiel-Codes, in beliebiger Reihenfolge nutzbar, zum Ausdrucken, Ausschneiden, Aufkleben:



M3-001



M3-002



M3-003



M3-004



M3-005



M3-006



M3-007



M3-008



M3-009



M3-010



M3-011



M3-012



M3-013



M3-014



M3-015



M3-016



M3-017



M3-018



M3-019



M3-020



M3-021



M3-022



M3-023



M3-024



M3-025



M3-026



M3-027



M3-028



M3-029



M3-030



M3-031



M3-032



M3-033



M3-034



M3-035



M3-036



M3-037



M3-038



M3-039



M3-040



M3-041



M3-042



M3-043



M3-044



M3-045



M3-046



M3-047



M3-048



M3-049



M3-050



M3-051



M3-052



M3-053



M3-054



M3-055



M3-056



M3-057



M3-058



M3-059



M3-060



M3-061



M3-062



M3-063



M3-064



M3-065



M3-066



M3-067



M3-068



M3-069



M3-070



M3-071



M3-072



M3-073



M3-074



M3-075



M3-076



M3-077



M3-078



M3-079



M3-080



M3-081



M3-082



M3-083



M3-084



M3-085



M3-086



M3-087



M3-088



M3-089



M3-090



M3-091



M3-092



M3-093



M3-094



M3-095



M3-096



M3-097



M3-098



M3-099



M3-100



M3-101



M3-102



M3-103



M3-104



M3-105



M3-106



M3-107



M3-108



M3-109



M3-110



M3-111



M3-112



M3-113



M3-114



M3-115



M3-116



M3-117



M3-118



M3-119



M3-120



M3-121



M3-122



M3-123



M3-124



M3-125



M3-126



M3-127



M3-128



M3-129



M3-130



M3-131



M3-132



M3-133



M3-134



M3-135



M3-136



M3-137



M3-138



M3-139



M3-140



M3-141



M3-142



M3-143



M3-144



M3-145



M3-146



M3-147



M3-148



M3-149



M3-150



M3-151



M3-152



M3-153



M3-154



M3-155



M3-156



M3-157



M3-158



M3-159



M3-160



M3-161



M3-162



M3-163



M3-164



M3-165



M3-166



M3-167



M3-168



M3-169



M3-170



M3-171



M3-172



M3-173



M3-174



M3-175



M3-176



M3-177



M3-178



M3-179



M3-180



M3-181



M3-182



M3-183



M3-184



M3-185



M3-186



M3-187



M3-188



M3-189



M3-190



M3-191



M3-192



M3-193



M3-194



M3-195



M3-196



M3-197



M3-198



M3-199



M3-200



M3-201



M3-202



M3-203



M3-204



M3-205



M3-206



M3-207



M3-208



M3-209



M3-210



M3-211



M3-212



M3-213



M3-214



M3-215



M3-216



M3-217



M3-218



M3-219



M3-220



M3-221



M3-222



M3-223



M3-224



M3-225



M3-226



M3-227



M3-228



M3-229



M3-230